


Gebruiksaanwijzing infuuspaal

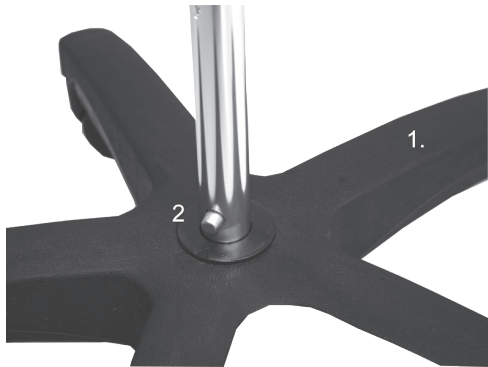

Volg voor een veilige montage de onderstaande instructie.

1. Neem het onderstel, de infuushaak en de buis uit de doos.
2. Zet het onderstel op de grond (1).
3. Zoek de drukknop aan de onderzijde van de buis (2).
4. Plaats de paal zodanig in het onderstel dat de drukknop tegenover het pijltje komt. De drukknop moet nu in de uitsparing 'schieten' en u hoort 'klik'. Controleer of de paal goed vast zit.
5. Trek nu de twee in elkaar geschoven palen uit elkaar en breng ze op de gewenste lengte. Schroef ze vervolgens goed vast door het bovenste stuk paal met de klok mee te draaien. Schuif de palen niet verder uit elkaar dan de geribbelde markering.

Dit veroorzaakt instabiliteit!

6. Schroef de infuushaak op de topbuis.
7. De infuuspaal is nu klaar voor gebruik.

Veiligheidsvoorschrift

- De infuuspaal is niet bedoeld als 'looprek' ter ondersteuning van de gebruiker. De infuuspaal is ontworpen om door een ambulante patiënt te worden voortgeduwd.
- Hoe lager de paal in hoogte wordt ingesteld hoe stabielere de paal is.
- Controleer of de paal goed in het onderstel bevestigd is.
- Plaats geen pompen op de paal die zwaarder zijn dan 6,8 kg.
- Maximale hoeveelheid vloeistof aan de infuushaken: 3 liter.

Hoogte: 1.50 – 2.00 meter

Algemeen

- De infuuspaal rijdt het best op een gladde vloer.

