

Vullen



Het medicatiecassettereservoir kan gemakkelijk worden gevuld terwijl de blauwe flowstopklem op zijn plaats blijft.


Het vloeistofpad afsluiten




Verwijder de blauwe klem om het vloeistofpad af te sluiten.



Het vloeistofpad openen

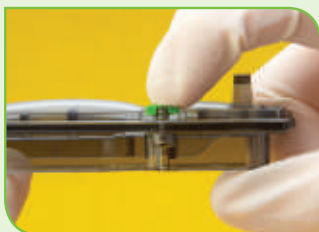

Druk op de groene knop om het vloeistofpad te openen.

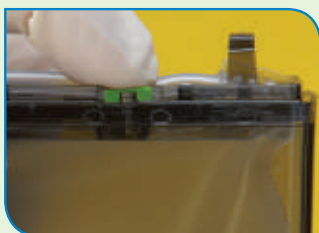

smiths medical

Smiths Medical Nederland B.V.
Jagersbosstraat 28
5241 JT Rosmalen
Tel: 073-528 50 50 - Fax: 073-521 23 36

MPAUC-1162



Smiths Medical Belgium N.V.
Excelsiorlaan 13 Bus 6
1930 Zaventem
Tel: 02-704 49 00 - Fax: 02-720 44 34

Gemachtigde vertegenwoordiger in de EU
Smiths Medical International Ltd.
TN25 4BF, VK
Telefoon: +44 (0) 1233 722100

www.smiths-medical.com
Vind lokale adresgegevens op www.smiths-medical.com/nl

Smiths Medical maakt deel uit van de wereldwijde technologische bedrijvengroep Smiths Group plc. Beschreven product(en) is/zijn mogelijk niet gelicentieerd of beschikbaar voor verkoop in Canada en andere landen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing/bedieningshandleiding voor een volledige lijst van indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. CADD, Legacy en de Smiths Medical- en CADD-ontwerpmerken zijn handelsmerken van Smiths Medical. Het symbool ® geeft aan dat het handelsmerk gedeponeerd is bij het Amerikaanse octrooi- en handelsmerkenbureau en in bepaalde andere landen.
©2014 Smiths Medical. Alle rechten voorbehouden. IN193111NL-112014

smiths medical
bringing technology to life

CADD® ambulante infusiesets met flowstop

Beknopte referentiekaart

CADD-Legacy® pompen



De flowstop free-flowbeveiliging is een op een integrale set gebaseerd free-flowbeveiligingshulpmiddel dat is toegevoegd aan CADD® toedieningssets en aan medicatiecassettereservoirs.

CADD®

Stap 1 - De lijn ontluchten


WAARSCHUWING: Laat de blauwe klem op het disposable op zijn plaats zitten tot u het disposable op de pomp gaat bevestigen. Als het disposable wordt bewaard zonder de blauwe klem, kan dit de nauwkeurigheid van de toediening aantasten.

Voor ontluchten:

Verwijder de blauwe klem van het disposable.



1. Klem de lijn af.
2. Bevestig de haken van het disposable in de scharnierpennen aan de onderzijde van de pomp.

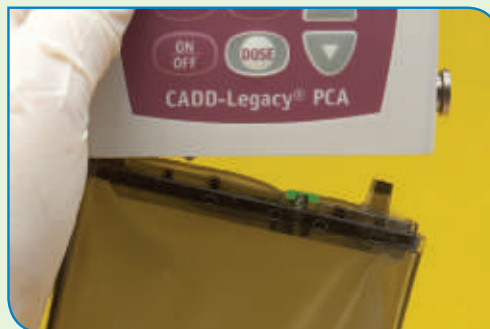

3. Zet de pomp met het disposable op een stevig oppervlak en druk de bovenzijde van de pomp omlaag zodat het disposable nauw aansluit op de pomp.



4. Plaats een CADD® pompsleutel in de vergrendeling, druk deze in en draai linksom tot de lijn op de vergrendeling tegenover de pijl aan de zijkant van de pomp staat en u de vergrendeling op zijn plaats voelt klikken.



5. Open alle klemmen.
6. Ontlucht de lijn met behulp van de prime functie van de pomp. Zorg ervoor dat het volledige vloeistofpad geen lucht meer bevat. Zorg ervoor dat de aseptische toestand van het distale uiteinde van de lijn behouden blijft.
7. Sluit alle lijnklemmen.

Stap 2 - De infusie starten

1. Sluit de lijn aan op de toegangsplaats bij de patiënt met behulp van een aseptische techniek.
2. Open alle lijnklemmen en start de infusie.

WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het vloeistofpad onder het filter geen lucht bevat voordat u de lijn op de patiënt aansluit. Raadpleeg de gedetailleerde gebruiksaanwijzingen die bij de toedieningssets, medicatiecassettereservoirs en extensiesets worden meegeleverd voor aanvullende informatie, aandachtspunten en waarschuwingen. Raadpleeg de gebruikershandleiding die bij de pomp wordt meegeleverd voor het primen van de pomp.