



# CADD™ medicatiecassettereservoirs (50 ml en 100 ml) met flowstop

Voor gebruik met CADD®-Solis pompen

De flowstop free-flowbeveiliging is een op een integrale set gebaseerd free-flowbeveiligingshulpmiddel dat is toegevoegd aan medicatiecassettereservoirs

## Stap 1 - Het cassette reservoir vullen

Gebruik aseptische technieken. Pas deze aan de hand van het beleid van de instelling aan.

1. Vul een spuit met het gewenste volume medicatie en verdunningsmiddel.
2. Verwijder de eindbeschermkap van de lijn.
3. Bevestig de gevulde spuit aan de luer en vul de medicatiezak (in cassette) tot deze ongeveer half vol is.
4. Kantel en draai de cassette zodat alle luchtballen in één grote luchtbel samenkomen. Verwijder de lucht.
5. Houd de spuit met de punt omlaag en injecteer de resterende vloeistof in het medicatiecassettereservoir. Sluit de lijnklem. Zorg ervoor dat medicatie en verdunningsmiddel goed worden gemengd in zowel de medicatiezak als de lijn.
6. Maak de spuit los van de luer. Sluit de luer af met de meegeleverde niet-ventilerende dop of bevestig deze aan de uitbreidingsset.






**OPMERKING:** Sluit de luer van het medicatiecassettereservoir aan op de luer-lock van de uitbreidingsset. Als het uiteinde van de anti-sifonklep van de uitbreidingsset wordt aangesloten op de luer van de medicatiecassette, klinkt er een hogedrukalarm wanneer u de pomp opstart.

## Stap 2 - De lijn ontluichten

**WAARSCHUWING:** Laat de blauwe klem op de cassette op zijn plaats zitten tot u de cassette op de pomp gaat bevestigen. Als de cassette wordt opgeslagen zonder het blauwe klemmetje kan dit de nauwkeurigheid van de toediening aantasten.

1. Verwijder het blauwe klemmetje van de cassette.
2. Bevestig een geschikte CADD® extensieset aan de luer.
3. Zorg ervoor dat de cassettevergrendeling niet vergrendeld is, open de cassettevergrendeling tot 90 graden en breng de cassettehaken aan in de scharnierpenen aan de onderzijde van de pomp.
4. Zet de pomp, zonder de cassettevergrendeling vast te houden, recht op een stevig, horizontaal oppervlak en druk de grendelzijde van de pomp omlaag tot de cassette stevig op zijn plaats vastklikt.
5. Duw de cassettevergrendeling omhoog in de gesloten stand. Als u weerstand ondervindt bij het omhoog duwen van de vergrendelingsbeugel van de cassette, mag u de grendel NIET FORCEREN. Als u het disposable niet met minimale of geen weerstand aan de pomp kunt vergrendelen, bevindt het disposable zich niet in de juiste stand voor vergrendeling. Maak het disposable los en herhaal de procedure. Als de tweede poging ook mislukt, gebruik de pomp dan niet meer en neem contact op met de klantenservice van Smiths Medical voor verdere ondersteuning.
6. Om de cassette te vergrendelen, steekt u de pompsleutel in de vergrendeling en draait u deze rechtsom in de vergrendelingsstand.
7. Open alle klemmen.
8. Ontlucht de lijn met behulp van de primefunctie van de pomp. Zorg ervoor dat het volledige vloeistofpad geen lucht meer bevat.
9. Als de extensieset een filter bevat, ontluicht het filter dan volgens de gebruiksaanwijzing van de extensieset.
10. Sluit alle lijnklemmen.

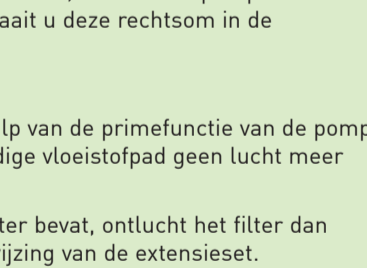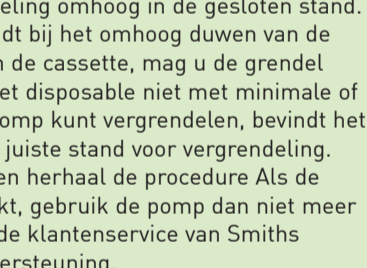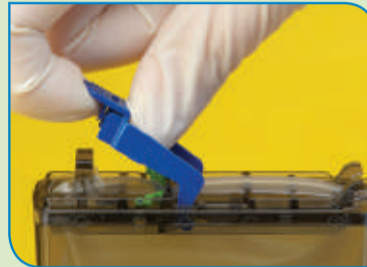

## Stap 3 - De infusie starten

1. Sluit de lijn aan op de toegangsplaats bij de patiënt met behulp van een aseptische techniek.
2. Open alle lijnklemmen en start de infusie.

**WAARSCHUWING:** Zorg ervoor dat het vloeistofpad onder het filter geen lucht bevat voordat u de lijn op de patiënt aansluit. Raadpleeg de gedetailleerde gebruiksaanwijzing die bij het medicatiecassettereservoir wordt meegeleverd voor aanvullende informatie, aandachtspunten en waarschuwingen. Raadpleeg de gebruikershandleiding die bij de pomp wordt meegeleverd voor het ontluichten van de pomp.

## Vullen



Het medicatiecassettereservoir kan gemakkelijk worden gevuld terwijl de blauwe flowstopklem op zijn plaats blijft.

## Het vloeistofpad afsluiten



Verwijder de blauwe klem om het vloeistofpad af te sluiten.

## Het vloeistofpad openen



Druk op de groene knop om het vloeistofpad te openen.

\*Raadpleeg voor instructies voor het vullen van het 250 ml cassette reservoir de gebruiksaanwijzing die bij het product is meegeleverd.

BESCHREVEN PRODUCT(EN) IS/ZIJN MOGELIJK NIET GELICENTIEERD OF BESCHIKBAAR VOOR VERKOOP IN CANADA EN ANDERE LANDEN

Smiths Medical Nederland B.V.  
Jagersbosstraat 28  
5241 JT Rosmalen  
Tel: 073-528 50 50  
Fax: 073-521 23 36

Smiths Medical Belgium N.V.  
Excelsiorlaan 13 Bus 6  
1930 Zaventem  
Tel: 02-704 49 00  
Fax: 02-720 44 34

Gemachtigde vertegenwoordiger in de EU  
Smiths Medical International Ltd.  
TN25 4BF, VK  
Tel: +44 (0) 1233 722100

www.smiths-medical.com Vind lokale adresgegevens op [www.smiths-medical.com/nl](http://www.smiths-medical.com/nl)

Smiths Medical maakt deel uit van de wereldwijde technologische bedrijvengroep Smiths Group plc. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing/bedieningshandleiding voor een volledige lijst van indicaties, contra-indicaties, waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen. CADD en de Smiths Medical- en CADD-ontwerpermerken zijn handelsmerken van Smiths Medical. Het symbool © geeft aan dat het handelsmerk gedeponeerd is bij het Amerikaanse octrooi- en handelsmerkenbureau en in bepaalde andere landen. Alle overige genoemde namen en merken zijn de handelsmerken of dienstmerken van de respectieve eigenaren. ©2014 Smiths Medical. Alle rechten voorbehouden. IN19856NL-112014

MPAUC-1159

CE 0473 Rx ONLY

smiths medical

CADD®